

**ZYRIS™**  
Smiles all around.

**Mode d'emploi  
de la trousse  
d'accessoires  
Dentsply Sirona**

## TABLE DES MATIÈRES

- 03 Contenu de la trousse d'accessoires
- 05 Utilisation prévue
- 06 Installation
- 12 Mises en garde
- 13 Guide des symboles

## CONTENU DE LA TROUSSE D'ACCESSOIRES



### Adaptateur électrique, 4,5 m (15 pi)

**REF** PIL0311 (adaptateur, électrique, 12 V c.c.-1 A, 4,5 m [15 pi], i3)

L'adaptateur électrique de 4,5 m (15 pi) de cette trousse d'accessoires est suffisamment long pour pouvoir le brancher dans la prise du socle de votre fauteuil ou une prise murale. Il remplace l'adaptateur électrique fourni avec le système Isolite 3.

### Embout de nettoyage, bleu

**REF** PIL0309 (embout de nettoyage, recirculation, i3)

L'embout de nettoyage bleu fonctionne avec le système de nettoyage Dentsply Sirona. Il remplace l'embout de nettoyage jaune fourni avec le système Isolite 3. Veuillez vous reporter à la section Entretien du mode d'emploi de l'Isolite 3 pour consulter la notice d'entretien détaillée.

### Tuyau de raccordement en silicone (5 cm [2 po])

**REF** AIL0245

Le tuyau de raccordement en silicone a un diamètre plus petit et est utilisé pour relier la base d'aspiration électrique à un port d'aspiration sous le module de l'assistant.

### Raccord de tuyau de l'adaptateur du port d'aspiration Dentsply Sirona

**REF** PIL0313

Pour permettre la connexion de l'Isolite 3, le raccord de tuyau plus petit est utilisé pour remplacer le raccord plus gros installé actuellement sur le port d'aspiration pour AHV.

## UTILISATION PRÉVUE

La trousse d'accessoires Dentsply Sirona-Isolite 3 permet l'installation intégrée de l'Isolite 3 sur le centre de traitement Dentsply Sirona. Cette trousse contient un cordon d'adaptateur électrique plus long qui se branche dans le socle du fauteuil et est acheminé par le bras articulé, pour une installation intégrée nette.

L'embout de nettoyage bleu qui a été ajouté se fixe sur le système de nettoyage intégré Dentsply Sirona. Un tuyau de raccordement en silicone de petit diamètre est fourni pour relier l'Isolite 3 au port d'aspiration sous le module de l'assistant Dentsply Sirona. Pour les fauteuils équipés de plusieurs ports d'aspiration pour AHV, la trousse contient un adaptateur de raccord de tuyau permettant l'installation sur un port d'aspiration pour AHV de diamètre correct.

## INSTALLATION

Zyris recommande de contacter un technicien d'entretien Dentsply Sirona pour s'assurer que l'installation est conforme aux termes de votre garantie Dentsply Sirona. L'adaptateur électrique de l'Isolite 3 doit être branché dans une source d'alimentation de

110 V, soit à l'intérieur du socle du fauteuil, soit dans une prise murale standard. Le cordon d'alimentation est suffisamment long pour être acheminé par le bras articulé, puis dans le module de l'assistant, jusqu'au socle du fauteuil. Le modèle Teneo n'étant pas équipé d'orifice prévu à cet effet, il convient d'en créer un en retirant une des nervures de l'ouverture du ventilateur inactif ou en perçant un petit orifice (12 mm/0,5 po) dans le socle.

### Option 1 : Réservoir d'aspiration avec port pour AHV (modèles Intego et C8)

**Étape 1** Identifiez la pièce à main qui sera remplacée par l'Isolite 3. Suivez le tube de la pièce à main jusqu'au point de raccordement sous le module de l'assistant. Débranchez le tuyau en tirant sur le connecteur du port d'aspiration pour AHV. Fixez le

raccord de tuyau Dentsply Sirona (PIL0313). Reportez-vous à la figure 1. pour une illustration.

**Étape 2** Fixez le tuyau de raccordement en silicone de 5 cm (2 po) au raccord à barbelures en haut de la base d'aspiration électrique.

**Étape 3** Branchez l'autre extrémité du tuyau de raccordement en silicone de 5 cm (2 po) au port d'aspiration sous le module de l'assistant.

**Étape 4** Placez la tête de commande dans un emplacement disponible de la barre porte-outils et branchez l'autre extrémité dans la base d'aspiration électrique.

**Étape 5** Branchez le cordon d'alimentation en haut de la base d'aspiration électrique qui a été acheminée par la base du module de l'assistant pour achever l'installation.

#### Option 2 : Réservoir d'aspiration avec port de pompe à salive (modèles Teneo)

**Étape 1** Identifiez la pièce à main qui sera remplacée par l'Isolite 3. Suivez le tube de la pièce à main jusqu'au point de raccordement sous le module de l'assistant. Débranchez uniquement le tuyau du port d'aspiration. Faites tourner le tuyau vers la droite et tirez vers le bas en laissant le raccord du connecteur d'aspiration en place.

**Étape 2** Fixez le tuyau de raccordement en silicone de 5 cm (2 po) au raccord à barbelures en haut de la base d'aspiration électrique.

**Étape 3** Branchez l'autre extrémité du tuyau de raccordement en silicone de 5 cm (2 po) au port d'aspiration sous le module de l'assistant.

**Étape 4** Placez la tête de commande dans un emplacement disponible de la barre porte-outils et branchez l'autre extrémité dans la base d'aspiration électrique.

**Étape 5** Branchez le cordon d'alimentation en haut de la base d'aspiration électrique qui a été acheminée par la base du module de l'assistant pour achever l'installation. REMARQUE : Si aucun orifice n'est disponible, il convient d'en créer un en perçant un trou de 1,3 cm (0,5 po) dans le socle ou de retirer une nervure de l'ouverture du ventilateur inactif.

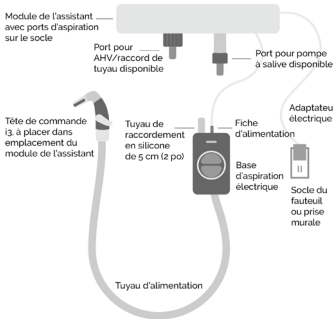


Figure 1. Installation

## MISES EN GARDE



**MISE EN GARDE :** Risque de choc électrique si un bloc d'alimentation non conforme est utilisé. Utiliser uniquement les blocs d'alimentation fournis avec cette trousse d'accessoires. L'utilisation d'autres sources d'alimentation risque d'endommager les composants électroniques et d'annuler la garantie du produit. Les caractéristiques d'alimentation électrique de la base d'aspiration sont 12 V c.c., 24 V c.a. et 1 A.

**ATTENTION :** Pour éviter les risques de choc électrique, il n'est pas recommandé d'utiliser une rallonge avec l'adaptateur électrique.

## GUIDE DES SYMBOLES



Attention



Numéro de référence



Polarité positive



Consulter le mode d'emploi

Zyris™, Inc.  
6868A Cortona Drive  
Santa Barbara, CA 93117 États-Unis

Téléphone +1-805-560-9888  
Télécopieur +1-805-966-6416  
Aux États-Unis, numéro sans frais :  
1-800-560-6066  
[www.zyris.com](http://www.zyris.com)

© 2020 Zyris™, Inc.  
Tous droits réservés.  
Information sur les brevets  
[www.zyris.com/patents](http://www.zyris.com/patents)

96-0694 Rév. A.